



Контрольний розчин для набору визначення прямого вільного кальцію

REF 181CTL 2x10 ml (мл)

ЗАСТОСУВАННЯ

Даний контроль використовується для in vitro діагностики при калібруванні досліджень по визначенню концентрації вільного кальцію.

КОРОТКИЙ ОПИС

Концентрація і активність компонентів контролю були пристосовані для широкого спектра автоматичних аналізаторів для забезпечення оптимального калібрування реагентів клінічної хімії.

КАЛІБРУВАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ

Завдані значення є специфічними для кожної партії і наведені нижче:

Партія 1811123

		Цільове значення mmol/L (ммоль/л)	Діапазон визначення mmol/L (ммоль/л)	Аналізатор
Контроль N (норма)	З використанням 3 реагентів	0,997	0,847 – 1,147	CHEM 400
Контроль P (патологія)		1,382	1,244 – 1,520	
Контроль N (норма)	З використанням 2 реагентів	0,963	0,819 – 1,107	CHEM 400
Контроль P (патологія)		0,976	0,83 – 1,122	CHEM 200/300
		1,378	1,240 – 1,516	CHEM 400
Контроль N (норма)	Середнє значення	1,26	1,134 – 1,386	CHEM 200/300
Контроль P (патологія)		0,979	0,832 – 1,126	Інші аналізатори
		1,34	1,207 – 1,475	

ПРИГОТУВАННЯ РЕАГЕНТУ

Постачається у вигляді рідини, готової до використання.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Контроль стабільний до закінчення терміну придатності при зберіганні при температурі 2-8°C.

ПРИМІТКА

- Бактеріальне забруднення може викликати зменшення стабільності багатьох компонентів набору.
- У разі подачі рекламачії або запиту на проведення контролю якості вкажіть номер серії, вказаний на упаковці або на окремих флаконах.
- Неналежне зберігання і/або забруднення можуть призвести до хибних результатів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Препарат не класифікується як небезпечний (DLg. № 285 сер. 28 л. н. 128/1998).

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Згідно з вимогами місцевого законодавства

Бібліографія

1. Department of Labour, Occupational Safety and Health Administration 29 CFR Part 1910, 1030 Fed. Register July 1, 1998, 6: 267-280.
2. Council Directive 90/679/EEC. Official journal of the European directives №L374 from Dec. 31, 1990: 1-12

Уповноважений представник:

ТОВ «НВК «Фармаско»
вул. Дмитра Луценка, буд. 10, м. Київ, 03193, Україна
Тел. + 38 (099)160-30-05
e-mail: diagnostic_company@ukr.net

Маркування	Пояснення символів маркування	Маркування	Пояснення символів маркування
	Медичний виріб для діагностики in vitro		Номер за каталогом
	Температурне обмеження		Виробник: GESAN PRODUCTION S.R.L., Via Fiera Dell'Eremita, 71 91021 Campobello di Mazara (TP) ITALY Gesam Продакшн С.Р.Л., Віа Фієра ДельЕреміта, 71 91021 Кампобелло-ді-Мадзара (ТТ), Італія
	Код партії		Знак відповідності технічним регламентам
	СЄ-маркування		Використати до
	Ознайомлення з інструкціями для застосування		

Calcium free control_instr1_10.2023

Редакція 1

Дата останнього перегляду: 23.10.2023

